

lunarion

電位・温熱組合せ家庭用医療機器 ルナリオン
管理医療機器 医療機器認証番号 307ACBZX00033000

メーカー希望小売価格
297,000 円
(税抜 270,000 円)

標準付属品



主な仕様

定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	電位：3W 温熱：135W
寸法	コントローラー：約 11.6cm(幅) x 5.6cm(高さ) x 20.6cm(奥行き) 電床内蔵マット：約 200cm(タテ) x 100cm(ヨコ)
重量	コントローラー（コードを含む）：約 800g

電位モード

出力	弱：200V（実効値） 中：520V（実効値） 強：200～830V〔変動〕（実効値）1,100V（ピーク値）
タイマー	1～8 時間（1 時間刻み）

温熱モード

出力	設定最高温度 55℃ ※JIS T 2008 に準じて測定 e スリープ機能：あらかじめ設定されたプログラムにより 温熱出力が自動的に変化
タイマー	1～8 時間（1 時間刻み）

リカバリーモード

電位出力	弱：200V（実効値） 中：520V（実効値） 強：830V（実効値）1,100V（ピーク値）
温熱出力	設定最高温度 55℃ ※JIS T 2008 に準じて測定 e スリープ機能：あらかじめ設定されたプログラムにより 温熱出力が自動的に変化
タイマー	3～10 時間（1 時間刻み）

⚠ **禁忌・禁止** 次のような人、及び部位には使用しないでください

●糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人 ●重度な血行障害のある部位 ●中程度以上の重い浮腫のある部位 ●血友病などの出血性素因の高い人 ●心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人 ●温熱に対して感覚の鈍い人や温度感覚喪失が認められる人 ●乳幼児（6 歳以下） ●適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人 ●その他、医師が不適当と認めた人

⚠ **併用禁忌**

●ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器とは同時に使用しないでください ●心電計などの装着形の医用電気機器とは同時に使用しないでください ●他の医療機器とは同時に使用しないでください



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのバイオニアとして、
アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト 検索
<https://ito-sports-project.com/>

国際規格 ISO 認証取得

医療機器品質マネジメントシステム ISO 13485

2026年、伊藤超短波株式会社は、
創業110年を迎えます。



健康セミナー

効果的な治療法を学べます



お客様センター

機器の操作方法や治療法、その他のお問い合わせは

TEL.048-254-1019
FAX.048-254-1049

受付時間：平日10:00～17:30（土・日・祝日休み）
※担当者の不在などで、当日のご対応ができない場合がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

製造販売元



〒332-0017 埼玉県川口市栄町 3-1-8
TEL.048-254-1015
<https://www.itolator.co.jp/>

お問い合わせ

A1c001510-2607 A2608DL(1)

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は、2026年8月現在のものです。

lunarion

ルナリオン



電位・温熱組合せ家庭用医療機器 ルナリオン

管理医療機器 医療機器認証番号 307ACBZX00033000



ふたつの治療で、心身を健康に。

マットでゆったり治療
電位
モード



温熱治療で血行促進
温熱
モード

頭痛、肩こり、
不眠症及び
慢性便秘の緩解

電子エネルギーが全身にやさしく作用し、和らげます。

電熱による温熱効果

疲労回復／血行をよくする／
筋肉の疲れをとる／筋肉のこ
りをほぐす／神経痛・筋肉痛
の痛みの緩解／胃腸の働きを
活発にする

頭寒足熱の快適構造で身体をやさしく温め、血行を
よくします。

使用目的：一般家庭で使用するこ

温熱／電位療法を交互に行う3種のリカバリーモード

リカバリー
冬
モード

温熱

電位

スタートから2時間は温熱療法、その後は温熱療法を多めに電位療法と交互治療を行います。

リカバリー
春秋
モード

温熱

電位

スタートから2時間は温熱療法、その後は電位療法とバランスよく交互治療を行います。

リカバリー
夏
モード

温熱

電位


スタートから1時間は温熱療法、その後は電位療法を多めに交互治療を行います。



簡単に使える快適な操作性



デザインは湯たんぽや枕をモチーフにした優しいカタチです。

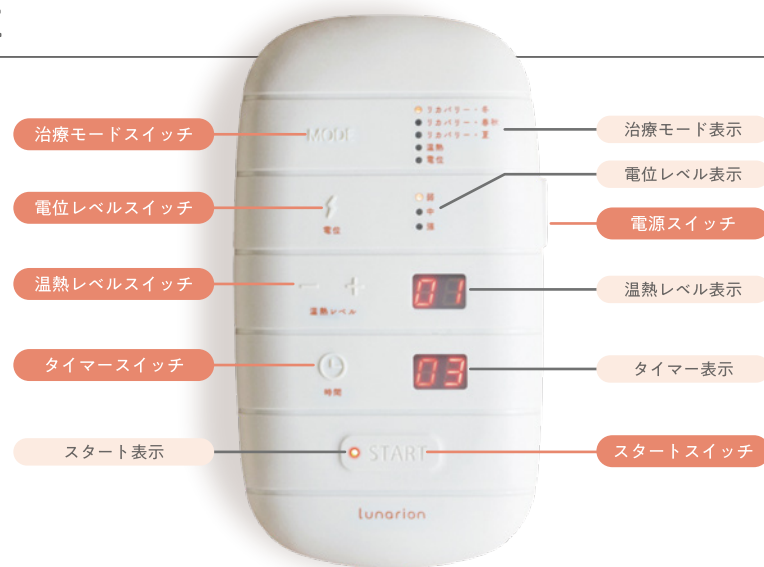


使いやすさを追求した機能

MAX 最大出力 1,100V (ピーク値)

出力の高いエネルギーを採用し、マットに横になるだけで身体全体を優しく包み込むように作用します。

e スリープ機能 (温熱モード・リカバリーモードのみ)

治療時間を設定すると、治療開始から終了までの温度が自動調節され、快適な治療環境が整います。また、スイッチを入れたとすばやく温くなる「速暖機能」でより快適にご使用いただけます。

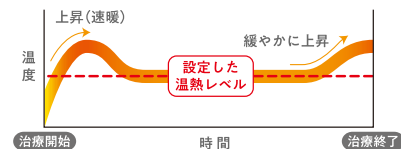

📄 前回治療モード記憶機能

前回使用したときの治療モードと時間、出力レベルを記憶。再度設定するわずらわしさがありません。


📶 エラー検知機能

コントローラーとマットが正しく接続されていないとき、エラー表示でお知らせします。

📊 省エネ表示機能

コントローラー表示の明るさを、自動プログラムで調節する省エネ機能です。


寝心地のいいマットレス

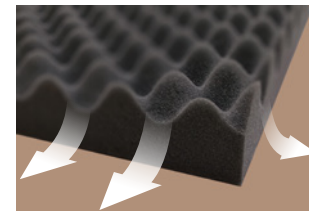

プロファイルウレタン

高反発プロファイルで体圧を分散

負担の大きい腰回りも高反発の波型の突起が下から持ち上げるように支え、過度な身体の沈み込みを防ぎます。

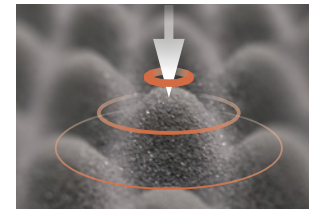

点で支えるプロファイル加工

プロファイル加工とは、マットレスの表面を波型に凸凹加工したもので、一つひとつの点が身体を優しく支え、寝ている間にかかる身体への圧力が特定の部位に集中しにくいメリットがあります。

防ダニ・抗菌・防臭



防ダニ



抗菌防臭

防ダニ・抗菌防臭加工の中わたで、
毎日清潔で心地よい環境へ

防ダニ・抗菌防臭加工を施したポリエステル樹脂わたを採用し、ダニを寄せつけず嫌なにおいも抑制します。